

C'è una vita dietro ogni test

Semplice test per Flu A+B

Ottimizza il tuo test point-of-care per Flu A+B con il Sistema portatile BD Veritor™ Plus

Offre utilizzo intuitivo e risultati affidabili in soli **10 minuti**.



Superare le sfide della stagione influenzale

FLU A+B

Il Sistema BD Veritor™ Plus migliora l'esperienza del paziente con: funzionamento semplice, flusso di lavoro efficiente, risultati rapidi e tracciabili



Semplifica il procedimento di test

- Facilità d'uso e funzionalità con un solo pulsante aiutano a ridurre potenziali errori manuali
- Offre una semplice gestione del campione con provette monodose pre-riempite



Offre risultati rapidi e affidabili

- Semplice lettura digitale dei risultati per Flu A+B in 10 minuti¹
- Garantisce risultati accurati correggendo il legame aspecifico e individuando i positivi non riconoscibili a occhio nudo¹



Efficienza nel flusso di lavoro

- Si adatta facilmente al vostro flusso di lavoro offrendo 2 modalità operative:
 - » **Walk Away:** il dispositivo viene inserito nell'analizzatore subito dopo la preparazione, consentendo al personale di svolgere più attività mentre il campione viene incubato
 - » **Analyze Now:** il dispositivo è inserito dopo il tempo di incubazione, consentendo di testare più campioni in sequenza



Offre la tracciabilità dei risultati

- Memorizza o scarica il numero di lotto, l'ID del paziente/specie, l'ID dell'operatore e i dati dei test utilizzando il modulo BD Veritor™ InfoWiFi
- Offre la possibilità di stampare i risultati tramite porta USB
- Invia i risultati con connettività wireless al tuo sistema di monitoraggio tramite il sistema informatico BD Synapsys™ opzionale utilizzando il modulo BD Veritor™ InfoWiFi

Performance Cliniche* vs PCR¹

	PPA [†]	NPA [‡]	Risultati in
Influenza A	83.6% (76.1%, 89.1%)	97.5% (95.7%, 98.5%)	10
Influenza B	81.3% (71.1%, 88.5%)	98.2% (95.7%, 99.3%)	

[†] concordanza percentuale positiva
[‡] concordanza percentuale negativa

Flu A+B risultati in 10 minuti

Descrizione	Cat no.	Qty
BD Veritor™ Plus System Flu A+B Point of Care test kit	256045	30 tests
BD Veritor™ Plus System Flu A+B Laboratory test kit	256041	30 tests
BD Veritor™ Plus Analyzer	256066	1 unit
BD Veritor™ InfoWiFi module	445010	1 unit
USB printer cable	443907	1 unit

The BD Veritor™ Plus System
There's a life behind every test

Not all products are available or authorized for sale in all regions. Please check with your local representative for availability in specific markets.

[Clicca sul video per riprodurre](#)
Se non funziona [Click here](#)



*Clinical performance data taken from package insert 8087667 Table 1.

¹Reference: 1. BD Veritor™ Plus System for Rapid Detection of Flu A+B. Package insert. 8087666 and 8087667 Becton, Dickinson and Company.

BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.

Via Enrico Cialdini 16 – 20161 Milano (MI) – Italy

bd.com/VeritorSystem-EU

